

Beoogd gebruik

Vivesse is een gynaecologische barrièrecrème die de fysiologische pH van de vagina herstelt en herstel mogelijk maakt van optimale condities voor de groei van lactobacillen die van nature voorkomen. Daarmee voorkomt Vivesse de kolonisatie en overgroei van pathogenen zoals *Candida albicans*, *Gardnerella* en andere ziekteverwekkers die terugkerende vaginale infecties veroorzaken.

Vivesse verlicht klachten en symptomen die in dergelijke omstandigheden meestal aanwezig zijn, zoals roodheid, jeuk, afscheiding en atrofie.

Vivesse kan worden aangeraden als symptoombestrijdende aanvulling op antischimmelbehandelingen en ook als barrièrecrème ter voorkoming van terugkerende vaginale infecties.

Verschijningsvorm

7 tubes met elk 5 ml.


Samenstelling

Erwteneiwit- en druivenpitextract, melkzuur, squaleen, gezuiverd water, natriumacrylaten copolymeer, paraffine, fenoxxyethanol, trideceth-polypropyleenglycol, sorbitanoleaat, piroctonolamine, maltodextrine.

Gebruiksaanwijzing

Ga vlak voor het slapengaan achteroverliggen op uw bed. Breng Vivesse rechtstreeks in de vagina in met behulp van de meegeleverde applicator.

- Trek uw knieën omhoog terwijl u op uw rug ligt.
- Breng de applicator voorzichtig diep in de vagina in.
- Duw de zuiger in om alle crème aan te brengen.
- Verwijder de applicator uit de vagina.

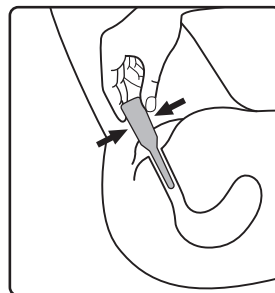

Dosering

Eenmaal daags aanbrengen tot symptomen verdwijnen.

Waarschuwingen

- De diagnose vaginale infectie moet worden gesteld door een zorgprofessional. Wij raden u daarom aan om naar uw arts te gaan als u niet zeker weet of het wel een vaginale infectie is, en ook als u ernstige klachten heeft, jonger dan 14 jaar bent of andere ziekten of risicofactoren heeft.
- Bij een vaginale infectie kan een farmacologische behandeling met een middel tegen bepaalde infecties met bacteriën (een antibioticum) of een middel tegen een infectie met een schimmel (een antimycoticum) nodig zijn. Dit hulpmiddel is geen antibioticum en geen antimycoticum omdat het geen bacteriedodend, bacteriostatisch of schimmelwerend effect heeft op de ziekteverwekkers. Dit hulpmiddel komt dus niet in de plaats van een behandeling die door een zorgprofessional wordt aangeraden. Wanneer een farmacologische behandeling nodig is, kan dit hulpmiddel gelijktijdig worden gebruikt.
- Gebruik dit product niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Raadpleeg eerst uw arts.
- Als u een allergische reactie krijgt in de periode dat u het hulpmiddel gebruikt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan en een arts raadplegen.
- Gebruik het product niet na de uiterste gebruiksdatum.
- Gebruik het product niet als het beschadigd is.
- Niet in de vriezer bewaren.
- Uit de buurt houden van warmte- en lichtbronnen.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties

Gebruik Vivesse niet bij overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van het hulpmiddel.



DEVINTEC SAGL

Corso Elvezia 14

6900 Lugano - Switzerland



Devintec Health S.L.

Calle General Pardiñas 99.6ª.

28006 Madrid – Spain

